



**Chipmunk-router
voor vast internet**



INFORMATIE VOORAF

Wat doet dit apparaat?

De Chipmunk-router verzamelt draadloos, door bluetooth-verbindingen, de meetgegevens van uw meetapparaten en stuurt die via internet door naar Chipmunk.

Waarom is dat belangrijk?

Zonder goed werkende router krijgen we uw meetgegevens niet binnen. Goed werkend betekent:

- Een stabiele internetverbinding
- Goede bluetooth-verbindingen met de meetapparaten

Hoe werkt dat?

1. We hebben de apparaten al gekoppeld aan jouw Chipmunk-router en u kunt direct gaan meten.
2. U doet uw lichaamsmetingen volgens de instructies die u hebt gekregen
3. Zorg dat u de metingen in de buurt van de Chipmunk-router uitvoert. Bent u te ver weg, dan worden de meetgegevens niet ontvangen en wordt er niets doorgestuurd.
4. De activiteitentracker hoeft u niets aan te doen. Die maakt automatisch regelmatig verbinding met de Chipmunk-router om uw gegevens door te sturen.



DE CHIPMUNK-ROUTER GEBRUIKEN

Vorbereiding:

1. Open de doos. U vindt hierin de witte Chipmunk-router. In de router zit een stroomkabel met adapter en een internetkabel.
2. Controleer of de router van uw internetprovider nog een vrije poort (een 'LAN-poort') beschikbaar heeft.
3. Zorg dat vlakbij die internetrouter een stopcontact beschikbaar is.

Installatie:

1. Haal de Chipmunk-router met kabels uit de doos en plaats de router dichtbij de router van je internetprovider.
2. Steek het vrije uiteinde van de kabel in een vrije LAN-poort van uw internetrouter. Dit kan maar op één manier. Het maakt niet uit in welke vrije LAN-poort u de kabel stopt, als het maar past.



*De internetrouter op deze afbeelding is een voorbeeld.
Uw eigen internetrouter kan er anders uitzien.*

3. Steek de adapter van de Chipmunk-router in het stopcontact.



4. De Chipmunk-router is klaar voor gebruik als de volgende groene lampjes branden/knipperen:

- BT
- SYS
- PWR
- ETH

Hebt problemen met het installeren van de Chipmunk-router of branden/knipperen de lampjes niet? Stuur een e-mail naar vrAGEN@chipmunkhealth.com. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Bekijk onze handige instructievideo's op www.chipmunkhealth.com/instructievideos.