



**USB-stick
voor mobiel internet**





Waarom krijg ik dit apparaat?

De Chipmunk-router verzamelt draadloos, door bluetooth-verbindingen, de meetgegevens van uw meetapparaten en stuurt die via internet door naar Chipmunk. Zonder goed werkende router krijgen we de meetgegevens niet binnen. Goed werkend betekent:

- Een stabiele internetverbinding
- Goede bluetooth-verbindingen met je meetapparaten

Als we de Chipmunk-router in uw woning koppelen aan uw vaste internetaansluiting hebben we geen stabiele internetverbinding. Daarom kiezen we in uw geval voor een mobiele internetverbinding.

Hoe werkt dat?

1. Haal de internetkabel die de Chipmunk-router met uw eigen internetrouter verbindt helemaal los en berg hem op bij de doosjes van de andere Chipmunk-apparatuur.
2. Haal het dopje van de USB-stick zodat u de metalen USB-stekker kunt zien.
3. Steek de USB-stick in de USB-poort van de router. Dat kan maar op één manier.
4. Check of het blauwe lampje op de USB-stick gaat knipperen en uiteindelijk continu blijft branden.
5. De Chipmunk-router is klaar voor gebruik als de volgende groene lampjes branden/knipperen:
 - BT
 - SYS
 - PWR

Waar moet je op letten?

Net als bij je mobiele telefoon werkt de USB-stick alleen als die een goed mobiel signaal kan ontvangen. Het beste is dan ook om de Chipmunk-router met USB-stick voor een raam te zetten en niet in een kast.

Hebt u problemen met het installeren van de USB-stick of branden/knipperen de lampjes niet? Stuur een e-mail naar vrAGEN@chipmunkhealth.com. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.