

## Hoe werkt de A&D weegschaal?

- Neem de weegschaal uit de doos en zet hem op een vlakke, harde ondergrond.



- Controleer of de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn. Het klepje zit aan de onderkant van de weegschaal.
- Ga in je ondergoed met beide voeten op de weegschaal staan.
- Staat in de display 'step of'? Stap dan van de weegschaal af.
- Op de display lees je je gewicht. Je gemeten gewicht wordt automatisch via de Chipmunk router verstuurd.
- De weegschaal schakelt zichzelf automatisch uit.