



**Chipmunk-router
für verkabeltes Internet**



VORINFORMATIONEN

Was macht dieses Gerät?

Der Chipmunk-Router sammelt die Messdaten von Ihren Messgeräten drahtlos über Bluetooth-Verbindungen ein, und sendet sie dann über das Internet an Chipmunk weiter.

Warum ist das so wichtig?

Ohne einen richtig funktionierenden Router werden wir Ihre Messdaten nicht erhalten. Wir brauchen also:

- Eine stabile Internet-Verbindung
- Gute Bluetooth-Verbindungen mit Ihren Messgeräten

Wie funktioniert es?

1. Wir haben die Geräte bereits mit Ihrem Chipmunk-Router verbunden und Sie können sofort mit den Messungen beginnen.
2. Sie führen die Messungen nach den Anweisungen durch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Messungen in der Nähe des Chipmunk-Routers ausführen. Wenn Sie zu weit entfernt sind, werden die Messdaten nicht empfangen und es werden keine Daten gesendet.
4. Sie müssen nichts im Aktivitäts-Tracker einstellen. Er verbindet sich automatisch und regelmäßig mit dem Chipmunk-Router, um Ihre Daten zu übertragen.



VERWENDUNG DES CHIPMUNK-ROUTERS

Vorbereitung:

1. Öffnen Sie die Packung. Dort finden Sie den weißen Chipmunk-Router. Der Chipmunk-Router enthält ein Internet- und Stromkabel mit Adapter.
2. Prüfen Sie, ob der Router Ihres Internet-Providers einen freien Port (einen 'LAN-Port') zur Verfügung hat.
3. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Internet-Routers eine freie Steckdose zur Verfügung steht.

Installation:

1. Nehmen Sie den Chipmunk-Router und die Kabel aus der Verpackung und platzieren Sie den Router in der Nähe des Routers Ihres Internet-Providers.
2. Stecken Sie das freie Ende des Kabels in einen freien LAN-Port Ihres Internet-Routers. Es spielt keine Rolle, an welchen freien LAN-Port Sie das Kabel anschließen, solange es passt.



*Der Internet-Router auf diesem Bild ist ein Beispiel.
Ihr eigener Internet-Router kann anders aussehen.*

3. Stecken Sie den Stromanschluss in die freie Steckdose.



4. Der Chipmunk-Router ist einsatzbereit, wenn die folgenden grünen Lämpchen leuchten:
- BT (kontinuierlich)
 - SYS (blinkend)
 - PWR (kontinuierlich)
 - ETH (blinkend)

Haben Sie Probleme bei der Installation des Chipmunk-Routers oder ist die Beleuchtung nicht eingeschaltet? Senden Sie eine E-Mail an unterstuetzung@chipmunkhealth.com Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Hier finden Sie praktische Anleitungsvideos:
<https://www.chipmunkhealth.com/de/anleitungen>