



Bloedglucosemeter Batterijen vervangen



INFORMATIE VOORAF

Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt er een batterij met maar 1 streepje in de display. Vervang de batterijen zo snel mogelijk.

Waarom is dat belangrijk?

Je kunt nog ongeveer 10 keer testen, totdat de batterijen echt leeg zijn.

De batterijen vervangen

- Leg de meter met de achterkant naar boven.
- Schuif de batterijhouder naar achteren.
- Druk de ronde batterijen uit de houder.
- Pak 2 nieuwe batterijen (knoopcellen) van het type: CR 2032.
- Druk de nieuwe batterijen in de houder: met de + naar beneden.
- Plaats de batterijhouder terug in de meter.
- De meter is nu klaar voor gebruik.